




3Shape Communicate

Connectie Elysee Dental




Connectie maken

- 1 Ga naar www.3shapecommunicate.com.
- 2 Klik op "Connections" en vervolgens op "Add Connection".

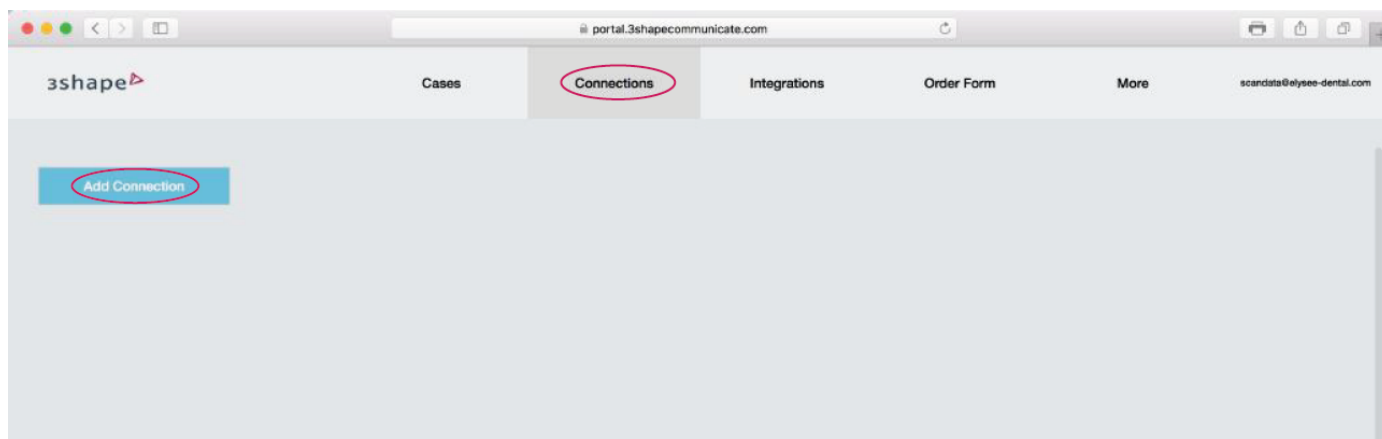

- 3 Vul hier het e-mailadres scandata@elysee-dental.nl in. Vink het vakje voor "Show me Labs" aan en klik op "Find". U kunt het standaardbericht laten staan of uw eigen bericht invullen. Klik daarna op "Connect".

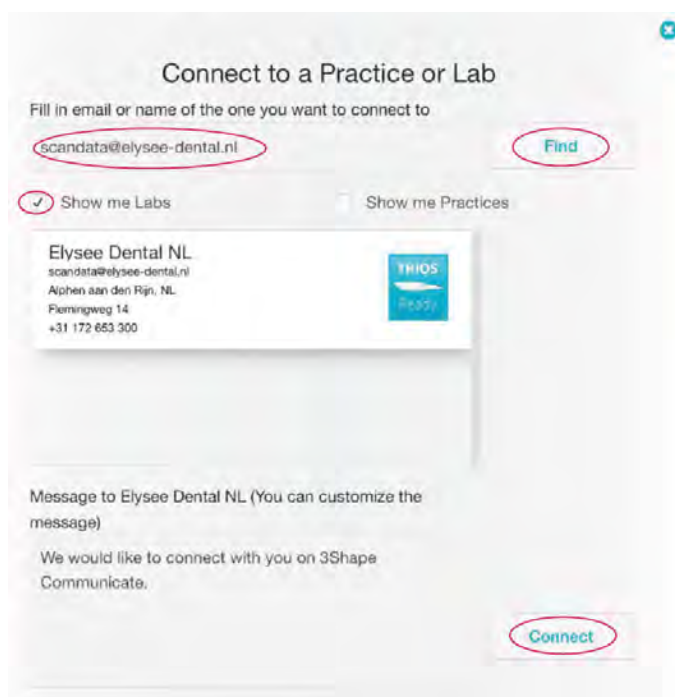

- 4 Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.

