

Procedure Twin Prothese

Beste tandarts,

Nieuwe ontwikkelingen in producten en oplossingen, is voor ons een belangrijke service richting onze klanten. Onze productspecialisten zijn hier dan ook dagelijks mee bezig. Wij denken dan niet alleen aan de laboratorium processen, maar trachten ook mee te denken aan optimale en efficiënte processen voor de tandartspraktijk.

Via deze weg willen we een nieuw product, met bijhorend proces, met u delen waardoor u nog meer voordelen uit uw intra-orale scanner haalt. We hebben altijd geclaimd dat een intra-orale scan veel meer is dan een afdruk alleen. Het volgende product en eenvoudige workflow is daar nogmaals het bewijs van.

Het product

Twin Prothese

Een digitaal vervaardigde kopie prothese gebaseerd op een intra-orale scan van een oude prothese.

Indicatie

Volledige protheses boven- en/of onderkaak.

Levertermijn

De levertijd is vijf werkdagen.

Voordelen

1. Prothese hoeft niet naar het laboratorium dus de **patiënt gaat naar huis met zijn bestaande prothese**.
1. **Slechts 5 minuten** voor het scannen van een boven- en onderprothese
2. De prothese is vanaf dan te allen tijde **reproduceerbaar** zonder nieuwe afdruk.

Werkwijze:

1. U neemt een **afdruk van de oude prothese(s)** met het gebruikelijke relining afdruk materiaal.
2. Deze prothese(s) **scant u uit de mond** rondom met uw IOS volgens meegeleverde instructievideo. Wanneer de antagonist geen volledige prothese is gaat u uiteraard intra-oraal scannen.
3. U voert al dan niet een beetverhoging door.
4. U verzendt de scan samen met de kleur en eventuele opmerkingen.

Heeft u nog vragen heeft of wilt u graag ondersteuning bij uw eerste scan, neemt u contact op met onze CAD/CAM specialist Olivier Vallaeys. Olivier is bereikbaar via e-mail: olivier.vallaeys@elysee-dental.be of via telefoonnummer: [0032 \(0\)494 23 16 92](tel:003220494231692)

Veel succes!

