

SCANBODIES INTRAORALES

Instrucciones de limpieza



Limpieza:

Procedimiento de limpieza automático basado en el programa Vario TD:

- Enjuague con agua fría durante 1 minuto
- Limpieza a 55°C/131°F ($\pm 2^\circ\text{C}/35,6^\circ\text{F}$) durante 5 minutos con producto para limpieza neodisher® MediClean (0.5% v/v)
- Neutralización con agua fría durante 2 minutos
- Enjuague con agua fría durante 1 minuto



Esterilización:

Esterilice con vapor los scanbodies usando el ciclo similar a la esterilización de instrumentación. Durante 4 minutos a 132°C/270°F.

** El alcohol y otras formas de limpieza puede tener una influencia negativa en el recubrimiento del scanbody.*

