



## ABC Masterkit & Superior seal bleeklepel

Een complete, effectieve, veilige  
en bovenal pijnloze behandeling

**CAVEX**

 **ELYSEEDENTAL**  
Modern Dental Group

Het streven naar witte tanden is één van de meest gevraagde cosmetische behandelingen in de wereld. Ook in uw praktijk zullen meer en meer patiënten vragen naar de mogelijkheden die u hierin kunt bieden. Belangrijk is dat u met een bleekgel werkt dat de juiste concentratie carbamideperoxide en een basisch pH-niveau heeft, zodat de patiënt geen gevoeligheid en nadelige gevolgen van de behandeling ervaart.

Cavex heeft het unieke ABC Bleeksysteem ontwikkeld waarbij ABC staat voor 'Activeren', 'Bleken' en 'Conditioneren'. Een veilig bleeksysteem dat garant staat voor fantastische resultaten zonder risico en zonder gevoeligheid. Elysee Dental levert de op maat gemaakte, kwalitatief hoogwaardige Superior seal bleeklepels.

**U ontvangt een ABC masterkit, compleet met alle stappen van de behandeling**

### Een eenvoudige en snelle workflow

- U stuurt de analoge of digitale afdrucken naar Elysee Dental
- U geeft op de opdracht bon aan dat u, naast de Superior seal bleeklepels, ook de ABC masterkit wilt ontvangen
- Na acht werkdagen ontvangt u de complete masterkit. Hierin vindt u een beetdoosje met de bleeklepels, de Cavex *Bite&White* bleekgel, Cavex *Bite&White* Stainless en Cavex *Bite&White* ExSense
- Het gehele pakket kunt u, na uitleg, aan de patiënt meegeven

Dit complete pakket kunt u tegen een prijs van € 99,- exclusief b.t.w. bestellen. Een deal die u dus niet alleen tijdswinst oplevert, maar ook nog eens een financieel voordeel voor uw patiënt!



# Het klinisch protocol

- Evalueer de huidige gezondheid van het gebit en leg de uitgangskleur vast. Zorg ervoor dat de verwachtingen van de patiënt over het eindresultaat realistisch zijn.
- Provisorische of tijdelijke gebitsrestauraties kunnen tijdens het bleekproces verkleuren, terwijl composiet- of polycarbonaat materiaal niet worden beïnvloed. Daarom dient een patiënt met composietrestauraties te worden meegedeeld dat bestaande composieten wellicht moeten worden vervangen, aangezien alleen natuurlijke tanden witter worden.
- Wacht bij patiënten die een esthetische of adhesieve restauratie nodig hebben 2-3 weken na de laatste bleekhandeling zodat de eindkleur vastligt. Alle restauraties dienen intact te zijn, of goed geseald met de juiste materialen.
- Bij gevoelige tanden kan eventueel 2 weken tevoren begonnen worden met de behandeling met ExSense.
- Waarschuw de patiënt dat gevoeligheid van de tanden tijdens de behandeling kan voorkomen. Het tandvlees dat met het middel in aanraking komt, kan rood of wit worden, maar neemt na enkele dagen de normale kleur weer aan.
- Adviseer de patiënt om de bleeklepels niet met gel te overladen om irritaties van zacht weefsel te voorkomen. Adviseer de patiënt ook om minimaal 60 minuten na elke behandeling niet te roken, eten en te drinken.
- De uiteindelijke kleur komt circa 2 weken na het begin van de behandeling tot stand. Na de behandeling dient een vervolgspraak te worden gemaakt.



## Contra-indicaties

Er wordt aanbevolen om in onderstaande gevallen de behandeling pas te starten na overleg met de huisarts van de patiënt:

- Bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven
- Bij personen die behandeld worden voor een ernstige ziekte
- Bij kinderen jonger dan 18 jaar

# De behandeling

## Activeren

De tanden worden uitvoerig gepoetst met Cavex *Bite&White* Stainless. Deze tandpasta zorgt ervoor dat oppervlaktevlekken en tandplak verwijderd worden, waardoor het bleekproduct in direct contact met het glazuur komt. Daarnaast heeft Cavex *Bite&White* Stainless de bijzondere eigenschap dat de pH-waarde in de mond wordt verhoogd waardoor de bleekgel sneller zijn werk kan doen.

## Bleken

Het bleken wordt gedaan met behulp van Cavex *Bite&White*, een bewezen effectieve en vooral veilige bleekgel met 16% carbamideperoxide. De toevoeging van natriumfluoride werkt mee aan de versterking van het glazuur terwijl kaliumnitraat meehelpt om eventuele gevoeligheid te voorkomen. Bij een behandeling van slechts 30 minuten is Cavex *Bite&White* al werkzaam; het is niet nodig om het langer in de mond te houden. Uitdroging van glazuur, wat ook gevoeligheid kan veroorzaken, wordt zo voorkomen.

## Conditioneren

De dagelijkse behandeling wordt afgesloten met Cavex *Bite&White* ExSense. Deze gaat in het gereinigde bleekbitje en wordt 10 minuten in de mond gehouden. Deze stap zorgt voor een snelle en langdurige vrijwaring van gevoelige tanden dankzij een revolutionaire cocktail van hydroxyapatiet en een zogenaamde 'hydrodispensing clay'. Dankzij de synergetische samenstelling van Cavex *Bite&White* ExSense dringt de hydroxyapatiet extra diep door in de tubuli en 'microscheurtjes' in het glazuur. Gebieden die gevoeligheid zouden kunnen veroorzaken worden hierdoor volledig afgesloten.

