



## CS Connect

Connectie Elysee Dental



# Connectie met Elysee Dental

- 1 Log in op [CS Connect](#).
- 2 Klik in de werkbalk op 
- 3 Klik in het venster "Partners" op "Een partner uitnodigen".
- 4 Vul volgend e-mailadres in: [scandata@elysee-dental.nl](mailto:scandata@elysee-dental.nl).
- 5 Laat in het veld Bericht de standaardtekst staan of plaats daarin uw eigen boodschap.
- 6 Klik op "Versturen".
- 7 Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.

