



## Brugsanvisninger på kroner, broer, inlays og onlays

## e.Max Press & e.Max CAD-kroner, broer, inlays og onlays

Alle e.Max Press og e.Max CAD-produkter er flussyreætsset på cementeringsfladen fra vores laboratories side.

### Før cementering

Produktets flussyrebehandling spolerer ved prøvning på model og ved indprøvning i munden. De fleste tandlæger vælger dog at foretage en indprøvning før cementering.

Ved behov for tilpasning må der kun slibes under vandafkøling, da man ellers risikerer frakturering. Eventuelle beslebne områder skal poleres godt op igen. Efter eventuel indprøvning ætzes cementeringsfladen med 5 % flussyregele – f.eks. "IPS Ceramic Etching Gel" fra Ivoclar Vivadent.

Producenten af e.Max Press og e.Max CAD - Ivoclar Vivadent – anbefaler, at man bonder kronen med Monobond Plus i 60 sekunder inden cementering.

### Cementering

Vi anbefaler cementering adhæsivt med en resincement. Mindst tekniksensitivt er det at vælge en dualhærdende variant. Følg producentens brugsanvisning for den valgte cement.

## Zirkonia-kroner, -broer, -inlays og -onlays

Denne gruppe af produkter omfatter alle zirkoniaprodukter med eller uden yderporcelæn. Varemærker udbudt af Elysee Dental i denne kategori er: IPS e.Max ZirCad, Forma, Lava, Lava Plus, og Monozir og Monozir Ultra. Monolitiske restaureringer, såvel som Forma-kroner og -broer, sandblæses med lavt tryk (1,5-2,0 bar) med aluminium oxid for at opnå en optimal overflade til bonding og cementering.

### Før cementering

- Kronen indprøves i munden
- Ved behov for tilpasning må der kun slibes under vandafkøling, da man ellers risikerer frakturering. Eventuelle beslebne områder skal poleres godt op igen
- Kronen rengøres

### Cementering

Kan cementeres med alle typer cementer. Følg producentens brugsanvisning for den valgte cement.

## Metal- & metalkeramik-kroner, -broer, -inlays og -onlays

Alle metalkeramikprodukter fra Elysee Dental er sandblæst på cementeringsfladen og skal dermed ikke yderligere forbehandles inden cementering.

### Før cementering

- Kronen indprøves i munden
- Ved behov for tilpasning må der ved metalkeramik kun slibes under vandafkøling, da man ellers risikerer frakturering af porcelænet
- Eventuelle beslebne områder skal poleres godt op igen
- Kronen rengøres

### Cementering

Kan cementeres med alle typer cementer. Følg producentens brugsanvisning for den valgte cement.