



HVAD ER EN ECODONT RETAINER?

Ecodont™ Retainer er en retentionsskinne lavet af genanvendeligt BPA-fri materiale. Det er en specialfremstillet og aftagelige skinne i klar plast, som du skal bruge efter at du har fået rettet dine tænder. Når du har fået lavet en TrioClear™ behandling eller haft faste bøjler på.

4 NØGLEINFORMATIONER



100% gen-
anvendelig

BPAFREE

Bisphenol-A
fri



Materiale fra
Tyskland



1.0mm
tykkelse



TRIO
CLEAR



ECODONT™ RETAINER

Det første skridt til at bevare
dit **smil**

TRIO
CLEAR

WWW.TRIOCLEAR.COM



TrioClear™ behandling tilbydes kun af TrioClear™-certificerede tandlæger. For mere information: trioclearaligners.eu eller spørg din tandlæge om TrioClear™.

DK24wK14

ECODONT™ RETAINER

HVAD ER FORDELENE VED EN ECODONT™ RETAINER?

En retentionsskinne holder dine tænder på plads. Undersøgelser har vist, at uden korrekt fastholdelse kan selv rettede tænder gradvist vende tilbage til deres oprindelige position. Når din tandregulering er afsluttet, er brugen af en retentionsskinne en afgørende del af den fortsatte vedligeholdelse af din tandstilling.



HVOR LÆNGE SKAL MAN BRUGE EN RETAINER?

At anvende en retentionsskinne efter din tandregulering er en vigtig del af behandlingen. De fleste tandlæger eller ortodontister vil efter endt behandling bede dig om at bruge din retainer-skinne.

Retentionsperiode:

- Fuld tid (dag og nat) i lige så lang tid som din behandling har stået på.
- Derefter natbrug hver nat i minimum 1 år.
- Efter første år med natbrug af skinnen – bruges den 2 - 3 nætter om ugen i en periode på 6 - 12 måneder.
- Herefter natbrug én nat om ugen, resten af livet...

HVAD ER HOLDERBARHEDEN PÅ RETAINEREN?

Du vil modtage 2 sæt Ecodont™ Retainer til enten overmund- eller undermund eller til både over-og undermund. Skinnerne kan holde omkring 1-2 år, hvis du behandler dem nænsomt, holder dem rene og undgår at placere skinnerne på steder med høj temperatur og fugtighed.

HVAD SKER DER, HVIS DU IKKE BRUGER RETAINER?

At anvende din Ecodont™ Retainer er den sidste fase af din tandreguleringsbehandling, og den bør blive din daglige rutine. For nogle patienter kan det i værste tilfælde forårsage uønsket bevægelse eller skæve tænder, hvis ikke skinnerne anvendes som foreskrevet. Som følge af tilbagefald kan det være nødvendigt at konsultere din tandlæge igen for yderligere tandregulering.



HAR BÅDE UNGE OG VOKSNE BRUG FOR EN ECODONT™ RETAINER?

Alder kan spille en rolle i den tid man skal anvende en retentionsskinne. Voksnes tænder er mere tilbøjelige til at flytte sig tilbage til deres udgangsposition hurtigere end unges. Den unges knogle og vedhæftninger til tanden er stærkere end hos voksne, derfor er der større risiko for tilbagefald ved voksne.

DO'S AND DON'TS MED DINE ECODONT™ RETAINER:

DO'S

- Anvend skinnerne i det tidsrum, som din tandlæge anbefaler.
- Børst forsigtigt skinnerne med en blød tandbørste og lunkent vand eller mild sæbe.
- Du kan gennemvæde skinnerne med antibakteriel tandrens i 10 minutter én gang dagligt for at fjerne bakterier og spyt.
- Skyl skinnerne, hver gang du tager dem ud.
- Børst dine tænder, og brug tandtråd, før du igen sætter skinnerne i munden.

DONT'S

- Brug IKKE skarpe genstande til at fjerne dine skinner med.
- Brug IKKE tandpasta, klorin eller lignende til at rense skinnerne med.
- Spis IKKE med skinnerne i munden.
- Drik IKKE andet end tempereret vand, når du har skinnerne i munden.