

Brugsanvisninger på kroner, broer, inlays og onlays fra Elysee Dental ApS

e.Max Press & e.Max CAD-(lithium discilikat) kroner, broer, inlays og onlays

Alle e.Max Press og e.Max CAD-produkter er flussyreætset på cementeringsfladen fra vores laboratories side.

Før cementering: Produktets flussyrebehandling spoleres ved prøvning på model og ved indprøvning i munden. De fleste tandlæger vælger dog at foretage en indprøvning før cementering. Ved behov for tilpasning må der kun slibes under vandafkøling, da man ellers risikerer frakturering. Eventuelle beslebne områder skal poleres godt op igen. Efter eventuel indprøvning ætzes cementeringsfladen med 5 % flussyregele – f.eks. "IPS Ceramic Etching Gel" fra Ivoclar Vivadent. Producenten af e.Max Press og e.Max CAD - Ivoclar Vivadent – anbefaler, at man bonder stubben med Monobond Plus i 60 sekunder inden cementering.

Cementering: Vi anbefaler cementering adhæsivt med en resincement. Mindst tekniksensitivt er det at vælge en dualhærdende variant. Følg producentens brugsanvisning for den valgte cement.

Zirkonia-kroner, -broer, -inlays og -onlays

Denne gruppe af produkter omfatter alle zirkoniaprodukter med eller uden yderporcelæn. Varemærker udbudt af Elysee Dental i denne kategori er: IPS e.Max ZirCad, Forma, Lava, Lava Plus, Procera og Helzirkonia. Zirkoniaprodukter har en naturlig let grovhed i strukturen, hvor de ikke er poleret på cementeringsfladen, og de skal derfor ikke yderligere klargøres til optimal retention.

Før cementering: Kronen indprøves i munden. Ved behov for tilpasning må der kun slibes under vandafkøling, da man ellers risikerer frakturering. Eventuelle beslebne områder skal poleres godt op igen. Kronen rengøres.

Cementering: Kan cementeres med alle typer cement. Følg producentens brugsanvisning for den valgte cement.

Metal- & metalkeramik-kroner, -broer, -inlays og -onlays

Alle metalkeramikprodukter fra Elysee Dental er sandblæst på cementeringsfladen og skal dermed ikke yderligere forbehandles inden cementering.

Før cementering:	Kronen indprøves i munden. Ved behov for tilpasning må der ved metalkeramik kun slibes under vandafkøling, da man ellers risikerer frakturering af porcelænet. Eventuelle beslebne områder skal poleres godt op igen. Kronen rengøres.
Cementering:	Kan cementeres med alle typer cementer. Følg producentens brugsanvisning for den valgte cement.

