

ECODONT® COMBI RETAINER

De unieke combinatie
van een uitneembare
clear retainer en een
C-C retainer



Milieuvriendelijke Productie

BPA^{FREE}

Bisphenol-A Vrij



1.0mm Dikte



TRIO
CLEAR



ELYSEE DENTAL (NL)
Flemingweg 14
2408 AV Alphen aan den Rijn

T +31 0172 65 33 00
E info@elysee-dental.nl
W www.elysee-dental.nl



ECODONT® COMBI RETAINER

TRIO
CLEAR



UNIEK BIJ TRIOCLEAR®: COMBI RETAINER

Maak kennis met onze innovatieve oplossing, de Ecodont® Combi Retainer, die de functionaliteit van een uitneembare clear retainer combineert met die van een C-C retainer.

VOORDELEN VAN DE COMBI RETAINER



Enkele Scan

Een patiëntvriendelijk proces, slechts 1 scansessie nodig.



Dubbele Retentie

Profiteer van de voordelen van zowel een clear retainer als een C-C retainer, en zorg zo voor een optimale retentie.



Eenvoudige Plaatsing


De uitneembare retainer dient als plaatsingshulpmiddel, waardoor de C-C retainer nauwkeurig op de optimale positie kan worden geplaatst.



Kosteneffectief

Twee-in-één retentie voor een aantrekkelijke prijs.

**ERVAAR GEMAK EN EFFICIËNTIE ALS
NOOIT TEVOREN MET DE ECODONT®
COMBI RETAINER**

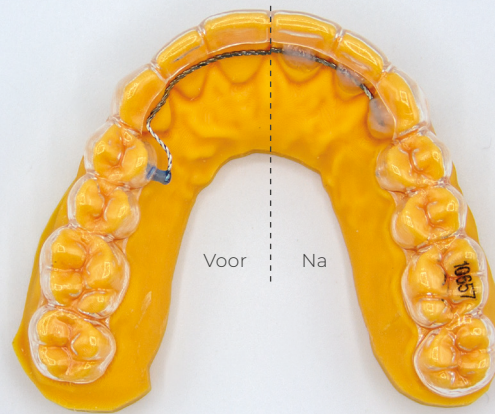

STAPPENPLAN

1. Plaats de Combi Retainer in de mond en controleer mogelijke interferenties in de occlusie.
2. Verwijder de Combi Retainer en ets de elementen op het palatale/linguale gebied waar u de C-C retainer gaat bevestigen.
3. Spoel dit af en blaas het goed droog.
4. Breng het bondingshars aan met een microbrush en hard dit daarna uit met een uithardingslamp.
5. Plaats de Combi Retainer en ga nogmaals over de C-C retainer met de microborstel met het bondingshars, dit keer van lateraal naar lateraal, en hard het daarna uit.
6. Breng de hechtpasta aan over de C-C retainer, van lateraal naar lateraal, en verdeel deze gelijkmatig over de C-C retainer op de elementen met uw microbrush. Zorg ervoor dat er geen lijm onder de Ecodont® retainer en tussen de elementen komt; verwijder deze indien nodig met een sonde.
7. Hard de lijm uit met de uithardingslamp.
8. Gebruik een boor om de C-C retainer distaal van de hoektanden los te maken van de Ecodont® retainer.
9. Verwijder de Ecodont® retainer en breng dit keer wat bondinghars en hechtpasta aan op de hoektanden. Laat deze hechtpasta ook uitharden met een uithardingslamp.
10. Werk de lijmbollen van de C-C retainer waar nodig af met een ronde/ovale boor.
11. Controleer nogmaals of de patiënt geen contact maakt bij het bijten. Indien dit wel het geval is, pas dit dan verder aan. Uw C-C retainer is nu geplaatst en de Ecodont® Retainer kan worden gebruikt volgens het retainer protocol.



SCAN DE
QR CODE
VOOR MEER
INFORMATIE

